

STRAPPAL

BENDA ANELASTICA ADESIVA IPOALLERGENICA

DESCRIZIONE	Benda anelastica, altamente adesiva, ipoallergenica, reseccabile con le mani. Molto resistente, è indicata in traumatologia per limitare particolari movimenti delle articolazioni (bendaggi funzionali) ed in caso di prevenzione dello sport (Taping).
SUPPORTO	Viscosa, colore bianco. Supporto in tessuto rigido spalmato su di un lato con massa adesiva ipoallergenica in grado di aderire alla cute tramite una semplice pressione
MASSA ADESIVA	Ossido di zinco Gomma sintetica Resina sintetica La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergico
CARATTERISTICHE E TECNICHE	Peso medio massa adesiva. 115 g/m ² Adesività lineare: 200gf/cm Carico minimo rottura: ordito 50 N/cm (media 70N/cm) trama 40 N/cm (media 50N/cm) Elasticità: prodotto assolutamente anelastico Permeabilità al vapor acqueo: non permeabile (valore limite Farmacopea Europea = valore medio 200g/m ² /24 ore) Impermeabilità all'acqua: Strappal non è impermeabile all'acqua..
STERILIZZAZIONE	Il prodotto è fornito non sterile e non è sterilizzabile.
CONSIGLI D'USO:	-Applicare su pelle pulita ed asciutta -Conservare in luogo fresco (<25°C) ed al riparo dalla luce -Indicato particolarmente per soggetti sensibili ad altri tipi di cerotti -Valutare attentamente il possibile rischio di reazioni allergiche in pazienti sensibilizzati verso i prodotti con massa adesiva -Togliere il prodotto qualora il soggetto sia sottoposto ad indagini radiologiche o a radioterapie, onde evitare il rischio di diffrazione dei raggi ionizzanti e comparsa di macchie opache sulle lastre
VANTAGGI	-Ottima tenuta del supporto -Adesività ottima e prolungata -Resecabile con le mani - Bordi zigrinati -Ipoallergenico (assenza di resine terpeniche nell'adesivo)
CONFEZIONE	Unità d'uso: benda singola Unità di vendita: confezione in cartoncino, contenente un numero di bende variabile, a seconda della misura L'unità d'uso non è di per sé identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
CONSERVAZIONE E DURATA	Il prodotto va conservato in luogo asciutto, al riparo dalla luce ed ad una temperatura non superiore ai 25°C. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di tre anni.
ADESIVITA' (Ncm-1)	1,9613 Ncm-1
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE e s.m.i.– Dispositivo medico – Classe I
CODICE CND	M030403
NUMERO DI REGISTRAZIONE	22346/R
FABBRICANTE	Prodotto da BSN medical SAS, F72320 Vibraye, Francia

STRAPPAL

BENDA ANELASTICA ADESIVA IPOALLERGENICA

Continua/2

DISTRIBUITO DA	BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20864 Agrate Brianza MB
SITO PRODUTTIVO	Made in France

CODICI ESTESI	NUOVI CODICI	DIMENSIONI	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
71487-00000-00	71487-00	2,5cmx10m	1 benda	36 bende	36 bende
71490-00000-00	71490-00	4cmx10m	1 benda	24 bende	24 bende
71493-00000-00	71493-00	5cmx10m	1 benda	18 bende	18 bende