

---

**DOCUMENTAZIONE TECNICA**

---

**LENOPLAST FREE****Benda adesiva elastica senza lattice****Classificazione (RD1591/2009):** Classe I**N° Organismo notificatore CE:** -**Fabbricante:** FARMABAN s.a**Codice Articolo (CND):** M0304010302

---

<b>CODICE</b>	<b>MISURE</b>	<b>CODICE EAN 13</b>	<b>RDM</b>	<b>UNITA DI VENDITA</b>
1100	5 cm x 2,7 m	8 4280 12 511000	103065/R	50
1102	7,5 cm x 2,7 m	8 4280 12 51102 4	103396/R	50
1104	10 cm x 2,7 m	8 4280 12 51104 8	103399/R	50
1114	5 cm x 2,7 m	8 4280 12 51114 7	1435782/R	60
1115	7,5 cm x 2,7 m	8 4280 12 51115 4	1435794/R	60
1116	10 cm x 2,7 m	8 4280 12 51116 1	1435800/R	60

---

**1. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO**

La unità di LENOPLAST latex free è costituita da:

- Tessuto elastico di cotone 100% sbiancato.
- Massa adesiva, senza lattice naturale, spalmata in forma sottile e uniforme sulla superficie della benda.
- Lamina bianca di polietilene ad alta densità o materiale simile goffrato.
- Il nottolino sul quale è avvolta la benda presenta i bordi arrotondati e non taglienti.
- Imbustato in foglio di polipropilene personalizzato micro perforato trasparente.

## 2. CONFEZIONAMENTO

### 2.1 Imballo primario

- Presentazione unitaria:
  - ✓ Cellophane termosaldato di polipropilene micro perforato personalizzato trasparente.
  - ✓ Scatola singola
- Presentazione Dispenser:
  - ✓ Cellophane termosaldato di polipropilene micro perforato trasparente personalizzato.
  - ✓ 30 bende in un dispenser.

### 2.2 Imballo di vendita

- Presentazione unitaria:
  - ✓ Cassa di cartone corrugato contenente 50 unità con singolo astuccio.
- Presentazione Dispenser:
  - ✓ Dispenser di cartone corrugato con 30 unità senza singolo astuccio.
  - ✓ Due dispenser da 30 unità cadauna, avvolte in polietilene termoretraibile che costituiscono l'unità di vendita.

## 3. DESCRIZIONE

LENOPLAST *Free* è una benda adesiva elastica longitudinalmente senza lattice o resine naturali.

## 4. PROPRIETA'

La sua estensibilità è dovuta alla speciale concatenazione del tessuto, altamente resistente nel senso dell'ordito / longitudinale.

Presenta falsi bordi che impediscono lo sfilacciamento, eliminando potenziali lacci di costrizione sulla estremità su cui viene applicato il bendaggio.

Tessuto bianco con linea centrale gialla per facilitare l'applicazione.

Adesivo di caucciù sintetico e ossido di zinco con elevata forza adesiva alla cute. Nella formulazione dell'adesivo non si utilizza ne lattice, ne caucciù naturale inoltre l'adesivo non presenta le proteine tipiche del caucciù naturale e delle resine, responsabili delle allergie, tipiche dei prodotti con lattice. L'adesivo è disposto sul tessuto sotto forma di sottile strato uniforme poroso che consente la traspirazione, impedendo così la macerazione della cute. Presenta margini liberi dall'adesivo al fine di evitare lesioni alla cute per bendaggi applicati per lunghi periodi di trattamenti.

LENOPLAST *Free* presenta un canotto arrotondato con un diametro di 18 mm., che facilita l'applicazione della benda evitando di provocare tagli alle mani del personale sanitario.

## Caratteristiche tecniche:

Peso benda (g)	5 cm	54 +/- 10
	7,5 cm	80 +/- 10
	10 cm	106 +/- 10
Altezza (mm)	5 cm	50 +/- 1,5
	7,5 cm	75 +/- 3
	10 cm	100 +/- 3
Diametro (mm)	60 +/- 5	
Forza adesiva (cN/cm)*	Min. 100	
Extensibilità (%)**	70 +/- 10	
Recupero o elasticità (%)*	Max. 80	
Grammi adesivo (g/m <sup>2</sup> )	90 +/- 15	
Lunghezza iniziale a riposo (m)**	2,7 (Min. 2,6)	
Lunghezza in tensione (m)	4,4-5,0	

\* in accordo con la Farmacopea Europea (1991)

\*\* a norme DIN 61632

## 5. INDICAZIONI

Consigliata per bendaggi di supporto e funzionali. Nel trattamento di patologie muscolari, tendinee ed articolari. Nel trattamento elastocompressivo di patologie vascolari dell'arto inferiore. Per fissaggio di medicazioni in chirurgia estetica e plastica, post operatorie, in chirurgia addominale e toracica.

## 6. CONTROINDICAZIONI

Controindicato in caso di soggetti diabetici o pazienti affetti da patologie arteriose.

## 7. PRECAUZIONI

Applicare sempre la benda sulla cute integra, pulita e asciutta. Per la fissazione di medicazioni applicare la benda senza tensione e delicatamente dal centro della medicazione stessa verso gli estremi. Mai fissare gli estremi o tirare la benda per fissare l'estremo contrario (può produrre lesioni cutanee).

## **8. SCADENZA**

Tre anni se conservata in luogo fresco ( $5 < T \text{ }^{\circ}\text{C} < 30$ ) e asciutto.

## **9. RIFIUTI**

Rifiuti solidi urbani, in considerazione e rispetto della normativa vigente.